

酒井慎太郎 監修

無縫製サポートベルト

取扱説明書

【管理医療機器】機械器具 81 磁気治療器 JMDN コード 71016000

【一般的名称】家庭用永久磁石磁気治療器

【認証番号】302AKBZX00080000

⚠ 警告

- 本製品の分解・改造・修理は絶対にしないで下さい。
- 本製品を使用しない時は付属のポリエチレン袋に入れ、取扱説明書と一緒に保管して下さい。
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内埋め込み型医用電気機器を使用している方は、ご使用にならないで下さい。
- 脳脊髄液（のうせきずいえき）短絡術用圧可変式シャントなど、磁気の影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している方は、ご使用にならないで下さい。
- 他の治療器と同時に使用しないで下さい。
- 医用機器を常用している方は、医師にご相談の上ご使用下さい。
- 磁気共鳴画像診断装置（MRI）の検査を受ける時は、検査の前に必ず使用を中止して下さい。
- 本製品は化学繊維を含みます。化学物質過敏症の方は使用前に医師にご相談下さい。
- 本製品に使用している磁石の磁気により、電化製品などの機器に影響を及ぼす恐れがあります。各機器の説明書をご確認の上、保管場所や保管方法にご注意下さい。

⚠ 禁忌・禁止

- ポリエチレン製内袋は捨てないでください。本製品と取扱説明書を一緒に内袋に収納して、保管して下さい。
- 磁石プレート、ステップボーンを入れたまま洗濯しないで下さい。
- 本製品付属の磁石プレート以外の磁石は使用しないで下さい。

形状・構造及び原理等

本製品は、その設計により腹斜筋の働きをサポートすると共に、ベルトに封入された補強部材の設計により固定性と可動性のバランスを保ち、さらにベルトに封入された永久磁石の磁気治療効果により、装着部位のコリおよび血行の改善をします。

【サイズ】

S～M：90cm

L～LL：105cm 全サイズベルト幅は 26cm

3L～4L：120cm

【製品素材】

本体ベルト：ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン（ゴム糸使用）

永久磁石：ネオジム磁石 ニッケルメッキ仕上げ

その他付属品：ポリプロピレン

使用目的、効果、効能

本製品は一般家庭でご使用いただく磁気治療器です。装着部位のコリおよび血行の改善をします。

品目仕様等

【本体ベルト】

製品素材：ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン（ゴム糸使用）

製品幅：26cm ±1cm

製品長さ：90～120cm ±3cm

製品サイズ：3 サイズ／S～M、L～LL、3L～4L

【固定ベルト】

製品素材：ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン（ゴム糸使用）

製品サイズ：3 サイズ／S～M：66cm

L～LL：76cm

3L～4L：86cm

【永久磁石】

製品素材：ネオジム磁石 ニッケルメッキによる表面仕上げ

製品形状：円柱型永久磁石

製品サイズ：外径 1.25cm × 厚さ 0.25cm

最大磁束密度：160mT±25%

※上記の製品規格は、磁石プレートを本体ベルトに封入し、製品装着時身体側に
向く面を表面として、表面全体に対する磁気測定時の最大磁束密度

※160mT=160 ミリテスラ=1600 ガウス

【補強部材ステップボーン】

製品素材：ポリプロピレン

製品寸法：2 サイズ／20×1.53cm、18.5×1.53cm

操作方法または使用方法

《 装着方法を記した図（裏面記載）をご覧ください正しく着用して下さい 》

- ①本体ベルト表面（ステップボーンがある側）の中央にある面ファスナー上部に固定ベルトを取り付けて下さい。また、固定ベルトの面ファスナーを、本体ベルトからはがした状態にして下さい。
- ②表裏をご確認の上、4 本のステップボーンを腰の位置にあてて下さい。
- ③本体ベルトを両手で伸ばしながら前面で重ね合わせ、面ファスナーに留めて下さい。この時ベルトをきつく締めすぎず、ウエストに並行に巻きつけるのではなく、斜め下方向につけるのがコツです。
※この後、固定ベルトで締め付けの強さを調整できますので、本体ベルトは強く締めすぎないようにお気を付け下さい。
- ④固定ベルトを下腹部に向けて引き伸ばして下さい。
- ⑤締め付けの強さを調整しながら固定ベルトを留めます。
- ⑥装着完了です。強く締めすぎると身体に負担をかける場合がありますので、心地良い装着位置・強さを調整して下さい。

包装

製品の包装単位：1枚／箱



磁石プレート、ステップボーンは取り外して洗濯
ネット使用

【製造販売業者および製造業者】


目黒精工株式会社 東京都目黒区平町2-18-10
TEL: 03-3723-6601

【販売業者】


株式会社ヴァルテックス 東京都渋谷区代々木1-11-2 1F
TEL: 03-6381-6336

装着方法

【本体ベルト】

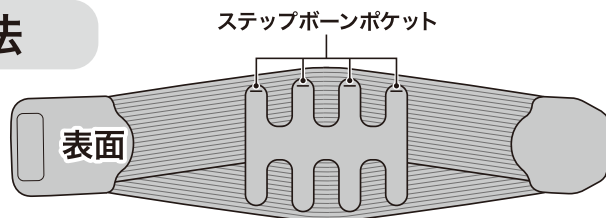

表面：ステップボーンポケットがある方
裏面（身体にあたる側）：磁石プレートポケットがある方

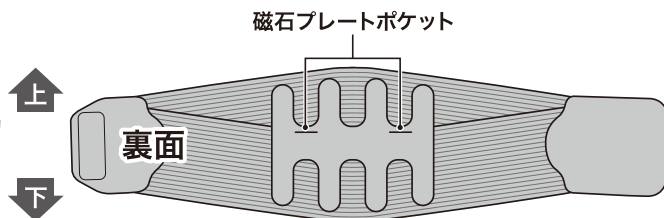

【固定ベルト】




1 本体ベルト表面の中央にある面ファスナー上部に、固定ベルトを取り付けて下さい。また、固定ベルト (A) の面ファスナーを、本体ベルト (B) からはがした状態にして下さい。 ※固定ベルトの取り付け位置は、お好みで上下に調整可能です。	2 表裏をご確認の上、4本のステップボーンを腰にあてて下さい。
3 本体ベルト (B) を両手で伸ばしながら前面で重ね合わせ、面ファスナーに留めて下さい。この時ベルトをきつく締めすぎず、ウエストに並行に巻きつけるのではなく、斜め下方向につけるのがコツです。	4 固定ベルト (A) を下腹部に向けて引き伸ばして下さい。
5 締めつけの強さを調整しながら固定ベルトを留めて下さい。	6 装着完了です。強く締めすぎると身体に負担をかけますので、心地良い装着位置・強さを調整して下さい。

注) ベルトの先を面ファスナー以外の場所に留めると、生地破損などの原因になります。必ず面ファスナーの上に留めて下さい。


洗濯の際は、磁石プレート (2枚) とステップボーン (4本) を全て取り出して下さい。

磁石プレート (2枚)

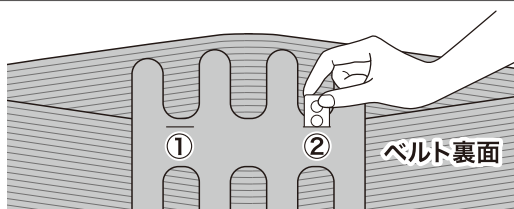

入れる時は、膨らみがある方 (凸の方) が身体にあたるように入れて下さい。

ステップボーン (4本)

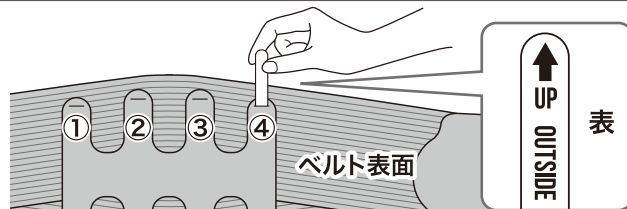

入れる時は、文字が記載されている方 (凸文字の方) を表にして、表記に従って入れて下さい。ポケットの高さに合わせて、長いサイズ2本、短いサイズ2本あります。

【ご使用上の注意】

表面、「警告」の項目をご一読下さい。
 «次の人は使用前に必ず医師に相談して下さい»
 ●悪性腫瘍 (しゅよう) のある方。●心臓に障害のある方。●妊娠初期の不安定期または出産直後の方。●糖尿病など、高度な末しょう循環障害による知覚障害のある方。●安静を必要とする方。●体温 38℃ 以上で有熱期の方。例 1. 急性炎症症状 [倦 (けん) 怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期。例 2. 衰弱しているとき。●捻挫 (ねんざ)、肉離れなど、急性とう痛性疾患の方。●医用機器を常用している方。●腰痛などで通院されている方。●皮膚に感染症や創傷のある方。●装着部位に、傷、はれもの、湿疹等の異常がある方。●化学物質過敏症の方。●慢性皮膚炎や、ゴム素材によるアレルギー体質の方。
 «ご使用に際して、次のことにご注意下さい»
 ●必ず肌着の上から装着して下さい。●就寝時は使用しないで下さい。●無理な締め付けは、身体に負担をかけますのでおやめ下さい。●本来の目的用途以外には、使用しないで下さい。●頭部には使用しないで下さい。
 «下記の場合は使用を中止し、医師にご相談下さい»
 ●身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止して下さい。●装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を直ちに中止し医師又は専門家にご相談下さい。●使用しても効果が現れない場合、医師又は専門家にご相談下さい。

【お取扱上の注意】

●ご使用前には、破れた部分がないことを確認し、不具合がある場合には使用を中止して、販売店等にご連絡下さい。●本製品に故障や不具合が発見された場合は使用を直ちに中止し、販売店等にご連絡下さい。●しばらく使用せず本製品を再度使用するときは、製品表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認して下さい。●時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけないで下さい。●電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけると、医療機器が正常に作動しなくなる恐れがありますのでご注意下さい。●本製品付属の磁石プレート以外の磁石は使用しないで下さい。●本製品を勝手に改造、修理しないで下さい。
 【保守・点検に係る事項】
 «お手入れについて»
 ●洗濯の際、付属の磁石プレートとステップボーンは、必ず本体ベルトから取り出して下さい。●洗濯の際に取り出した磁石プレートは、必ず付属のポリエチレン袋に収納し、お子様の手の届かないところ、及び磁気の影響を受けるものがない場所に保管して下さい。●耐久性を損なうことがあるので、洗濯表示にしたがってお取り扱い下さい。●洗濯の際、はじめのうちは色落ちする場合がございます。●ご使用により、ヨレジワ等ができる場合がありますが、構造上問題はありません。
 «保管について»
 ●ご使用後の製品は、洗濯後に完全に乾いてから本取扱説明書と一緒に付属のポリエチレン袋に収納し、お子様の手の届かない所に保管して下さい。●湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
 «廃棄・処分について»
 ●本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体の指示に従い正しく処分、廃棄して下さい。